

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

### **1. instructies voor het gebruik van de maskers**

- a. Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt
- b. Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren in zitten
- c. Houd het masker vast met de stijve buigbare strip naar boven en de gekleurde kant naar buiten gericht
- d. Zet het masker op : neem met twee handen de elastieken vast en breng deze achter je oren zodat het masker neus, mond en kin bedekt
- e. Vorm of knijp in de neusbrug om zich aan te passen aan de vorm van uw neus

### **2. Instructies voor het verwijderen van het mondmasker.**

- a. Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt
- b. Raak de voorkant van het masker niet aan, omdat het mogelijk besmet is. Raak alleen de oorlussen aan en haal het achter de oren weg
- c. Gooi het masker weg in een gesloten vuilbak
- d. Was je handen met water en zeep voordat je iets anders aanraakt

### **Extra waarschuwingen**

- a. Dit product mag enkel gebruikt worden door kinderen > 3 jaar wegens verstikkingsgevaar en dat kinderen onder supervisie behoren gehouden te worden als zij dit product dragen.
- b. Het dragen van een masker vraagt aanpassing, namelijk het gevoel van minder ademlucht te hebben, dit is normaal, het masker werkt. (optioneel)
- c. Let op, een mondmasker laat zeker geen zware inspanning toe, bv intensief sporten

MERKNAAM : SAIKE CARE artikelnr SK618 EAN 6973182460020

INVOERDER : D & J CONSULTING hasseltsesteenweg 381 001 te 3800 ST TRUIDEN